

CLOVER 3

Loupe électronique portative



Mode d'emploi
V. 1

Sommaire

Précaution _____	3
Démarrage rapide _____	3
Vue d'ensemble _____	3
Vue d'ensemble de l'appareil _____	4
Accessoires _____	5
Charge de la batterie _____	5
Indicateurs LED _____	5
Béquille d'aide à l'écriture _____	6
Utilisation _____	6
Type de retours sonores _____	6
Modification du retour sonore _____	6
Agrandissement _____	6
Mode de couleur _____	7
Luminosité _____	7
Éclairage du document _____	7
Gel de l'image _____	8
Mémorisation _____	8
Économie d'énergie automatique _____	8
Restauration des paramètres usine _____	8
Arrêt forcé de l'appareil _____	8
Dépannage _____	8
L'appareil ne s'allume pas _____	8
Écran noir ou écran blanc _____	8
L'image ne change pas _____	9
Flou ou parasites dans l'image affichée _____	9
Caractéristiques _____	9

Précaution



Avant d'utiliser CLOVER 3 pour la première fois, veuillez charger la batterie. Référez vous à la partie concernant la batterie pour plus de détails.



Utilisez l'appareil dans un endroit où la température se situe entre 10 et 35 degré Celsius.



Gardez l'appareil hors des zones humides, de la pluie et d'autres sources de liquides. Ne pas immerger l'appareil.



N'essayez pas de réparer l'appareil. Toute intervention non autorisée annulera la garantie. Contactez le service après-vente de votre distributeur.



Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

Démarrage rapide



Vue d'ensemble

Merci d'avoir acheté CLOVER 3.


CLOVER 3 est une loupe électronique de poche avec écran de 3,5 pouces de diagonale, délivrant une image claire et précise. Lisible sous tous les angles, l'écran permet de lire tout en utilisant un large éventail de niveau d'agrandissement et de modes de couleurs contrastées.

CLOVER 3 vous permet de vous placer sur ou à proximité de l'objet à agrandir. Agrandissez l'image ou gelez là pour la visionner plus tard. L'appareil dispose également d'une béquille intégrée facilitant l'écriture. C'est l'appareil idéal pour lire une étiquette, un livre, des périodiques et bien plus encore.



Vue d'ensemble de l'appareil

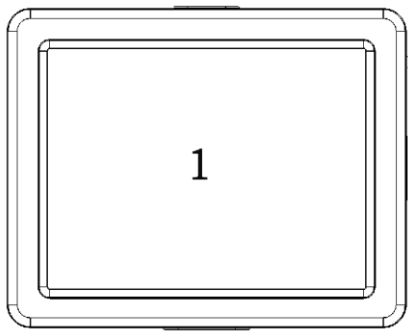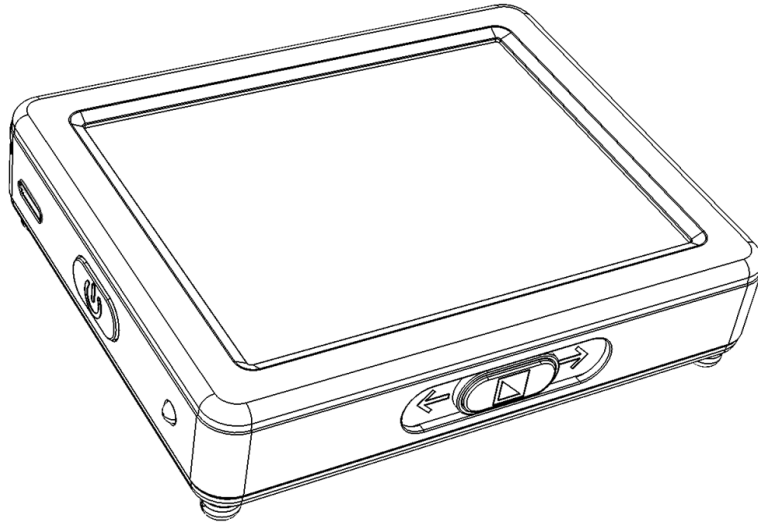


- 1. LCD screen
- 2. Camera

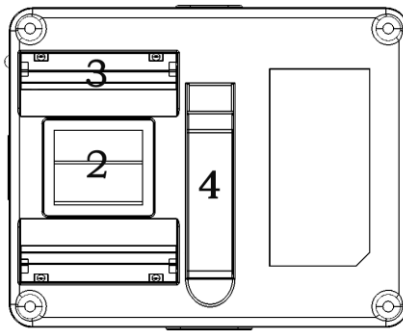

- 3. LED lights
- 4. Stand

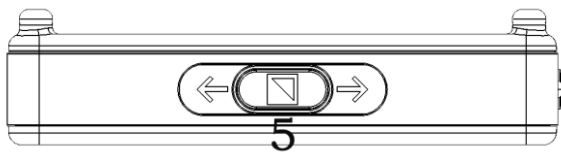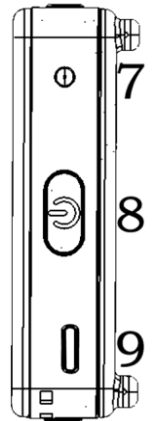

- 5. Zoom & Mode
- 6. Freeze
- 7. Power LED

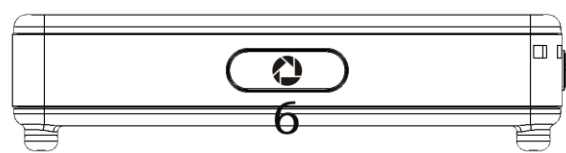

- 8. Power
- 9. USB type-C Port

Accessoires




Mode d'emploi
Adaptateur secteur
Chiffonnette

Sacoche de transport
Câble USB
Dragonne

Charge de la batterie

1. Connecter le câble USB fourni à l'adaptateur secteur
2. Connectez le câble USB fourni sur le port USB-C de l'appareil
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant, la charge démarre.

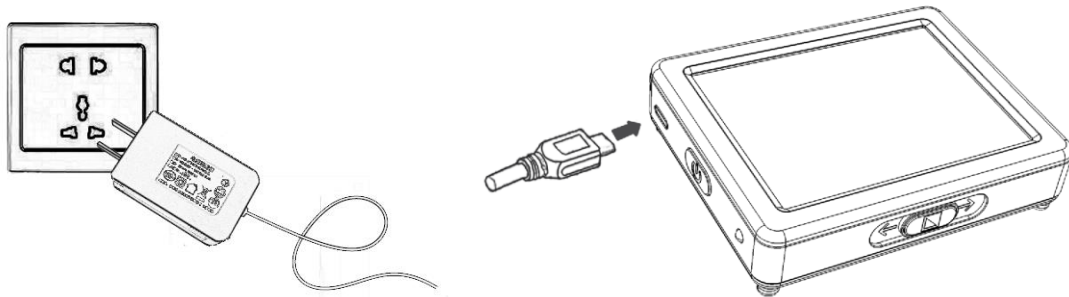

Indicateurs LED


Le statut de la charge est indiqué par le témoin lumineux LED.

En charge appareil éteint, la LED est verte. La LED verte s'éteint lorsque l'appareil est chargé.




- Quand l'appareil est allumé et branché sur secteur, la LED est verte.
- Quand l'appareil est en marche, non connecté au secteur, le témoin lumineux est vert puis passé au rouge lorsque le niveau de la batterie est bas.
- Quand le témoin lumineux rouge clignote, connectez rapidement la loupe au secteur pour recharger sa batterie.
- Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de la batterie en appuyant brièvement sur le bouton d'allumage.

Béquille d'aide à l'écriture

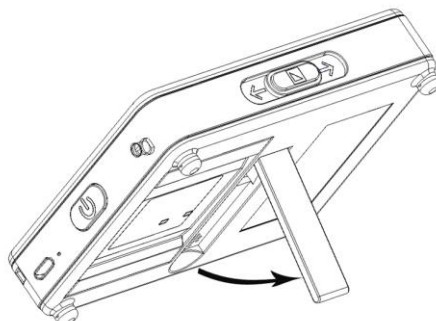Déployez la béquille telle qu'illustré ci-après. Vous pouvez écrire sous la camera dans le champ de celle-ci.



Utilisation


- Appuyez sur le bouton marche / arrêt  pendant 3 secondes pour allumer l'appareil quand il est éteint.
- Appuyez sur le bouton marche / arrêt  pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil quand il est allumé.
- Appuyez sur le bouton marche / arrêt  brièvement pour vérifier les états de charge de la batterie, du mode de couleur utilisé, du gel d'image et le retour sonore.
- Appuyer sur d'autres boutons pendant que le bouton marche est maintenu appuyé vous permet d'activer d'autres fonctionnalités.

Type de retours sonores

Allumage et extinction de l'appareil
Bouton pressé
Batterie faible

Modification du retour sonore

Activer/désactiver le retour sonore : Appuyez et maintenez le bouton de gel d'image

 pendant 3 secondes.

Agrandissement

- Faîtes coulisser le bouton Zoom & Mode à droite pour augmenter le taux d'agrandissement. Maintenez le bouton pour augmenter le taux de façon continue.






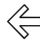


- Faites coulisser le bouton Zoom & Mode à gauche pour diminuer le taux d'agrandissement. Maintenez le bouton pour diminuer le taux de façon continue.

Plage d'agrandissement

À plat sur le support : 3,8 x à 16 x.

Mode de couleur

Un mode de couleur est une combinaison prédéterminée de couleurs. Le mode couleurs naturelles est utile pour visionner des photographies, des cartes... quant aux modes bicolores ils permettent de lire clairement grâce à différentes combinaisons de fonds et de couleurs de texte.

- Appuyer sur le bouton Zoom et mode    pour passer d'un mode de couleur à l'autre.
- Appuyez 2 secondes sur le bouton Zoom & Mode    pour basculer du dernier mode bicolore utilisé au mode couleurs naturelles.





Liste des modes de couleurs disponibles

- | | |
|----------------------|-----------------|
| •Couleurs naturelles | •Bleu sur blanc |
| •Blanc sur noir | •Jaune sur bleu |
| •Noir sur blanc | •Bleu sur jaune |
| •Jaune sur noir | •Vert sur noir |
| •Blanc sur bleu | •Rouge sur noir |

Luminosité



Ajustez la luminosité de l'écran pour les différents modes de couleur. La valeur de luminosité par défaut est surlignée en vert.

Combinaison de touches :

Maintenez le bouton marche/arrêt  et coulissez le bouton Zoom et Mode    à gauche pour diminuer la luminosité, à droite pour l'augmenter.

Éclairage du document

L'éclairage par LED du document peut être désactivé, cela est utile pour les documents imprimés sur papier brillant.

Combinaison de touches : appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt  et appuyez brièvement sur le bouton gel de l'image  pour allumer et éteindre l'éclairage du document.

Gel de l'image

Geler l'image sur l'écran peut s'avérer utile pour lire et augmenter ou réduire le taux d'agrandissement, changer le mode de couleur. Notez qu l'ajustement de la luminosité n'est pas possible quand une image est gelée à l'écran.

- Appuyez sur le bouton gel de l'image  pour activer la fonction.
- Appuyez à nouveau sur le même bouton  pour quitter le mode et retrouver une vue en directe.



Mémorisation

L'appareil mémorise automatiquement les réglages en fonction tels que le mode de couleur, le taux d'agrandissement, les retours sonores. Ils seront à nouveau utilisés lorsque l'appareil démarre.




Économie d'énergie automatique

Si aucun bouton n'est activé et si l'appareil ne détecte aucun mouvement il s'arrêtera automatiquement au bout de 3 minutes.

Restauration des paramètres usine

Appuyez et maintenez le bouton Gel d'image  et Zoom & Mode  en même temps pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil. L'appareil s'éteint de lui-même.

Arrêt forcé de l'appareil

Lorsque l'appareil est bloqué ou ne peut s'éteindre de lui-même normalement, appuyez sur les boutons Marche / Arrêt  et Gel d'image  et Zoom & Mode  en même temps.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- Connectez l'adaptateur secteur pour le charger
- Chargez la batterie
- Réinstallez la batterie

Écran noir ou écran blanc

- Si l'appareil est utilisé sur une surface plate et de couleur unie, l'écran peut apparaître entièrement noir ou blanc. Levez l'appareil pour vérifier s'il répond correctement.
- Ajustez le niveau d'agrandissement

- Ajustez le mode de couleur
- Quand l'appareil est connecté à un téléviseur, l'écran est noir
- Redémarrez l'appareil
- Réinstallez la batterie

L'image ne change pas

- Si l'appareil est en mode Gel d'image, l'image est fixe
- Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour vérifier le niveau de charge de la batterie
- Redémarrez l'appareil
- Réinstallez la batterie

Flou ou parasites dans l'image affichée

- Ajustez la luminosité
- Nettoyez l'écran et la lentille de la caméra

Contactez Etex France si le problème ne disparaît pas

Caractéristiques

- Affichage : écran 3,5 pouces TFT LCD
- Caméra : caméra de proximité haute définition
- Agrandissement : de 3,8 x à 16 x
- Modes de couleur : 10 modes
- Avertissement sonore : Marche / Arrêt
- Luminosité : six niveaux d'ajustement, réglage d'usine au maximum
- Éclairage LED : marche / arrêt
- Gel d'image : déplacement dans l'image intelligent
- Mémoire : enregistrement automatique des derniers paramètres utilisés
- Économie d'énergie : arrêt automatique après 3 minutes
- Support intégré pour l'écriture
- Autonomie : Batterie au lithium, plus de 3 heures d'autonomie
- Adaptateur secteur: 5V/1A USB-C, compatible 110-240V
- Dimensions : 90 x 72 x 18 mm
- Poids : 100 g



9-11 avenue Ledru Rollin
75012 PARIS
Tél. : 01.55.78.25.00
Fax : 01.55.78.25.05
info@etexfrance.fr - www.etexfrance.fr