

Guide de démarrage rapide Smart Reader OCR HD

Fonctions principales

Appuyer pour lancer l'OCR,
appuyer à nouveau pour
revenir en mode "Prêt"


Appuyer pour lancer l'OCR,
appuyer à nouveau pour
revenir en mode "Prêt"

Appuyer pour lancer la lecture,
mettre en pause, ou sélectionner

Appuyer pour revenir
au menu précédent

Appuyer pour aller à
la ligne précédente

Appuyer pour aller à
la ligne suivante

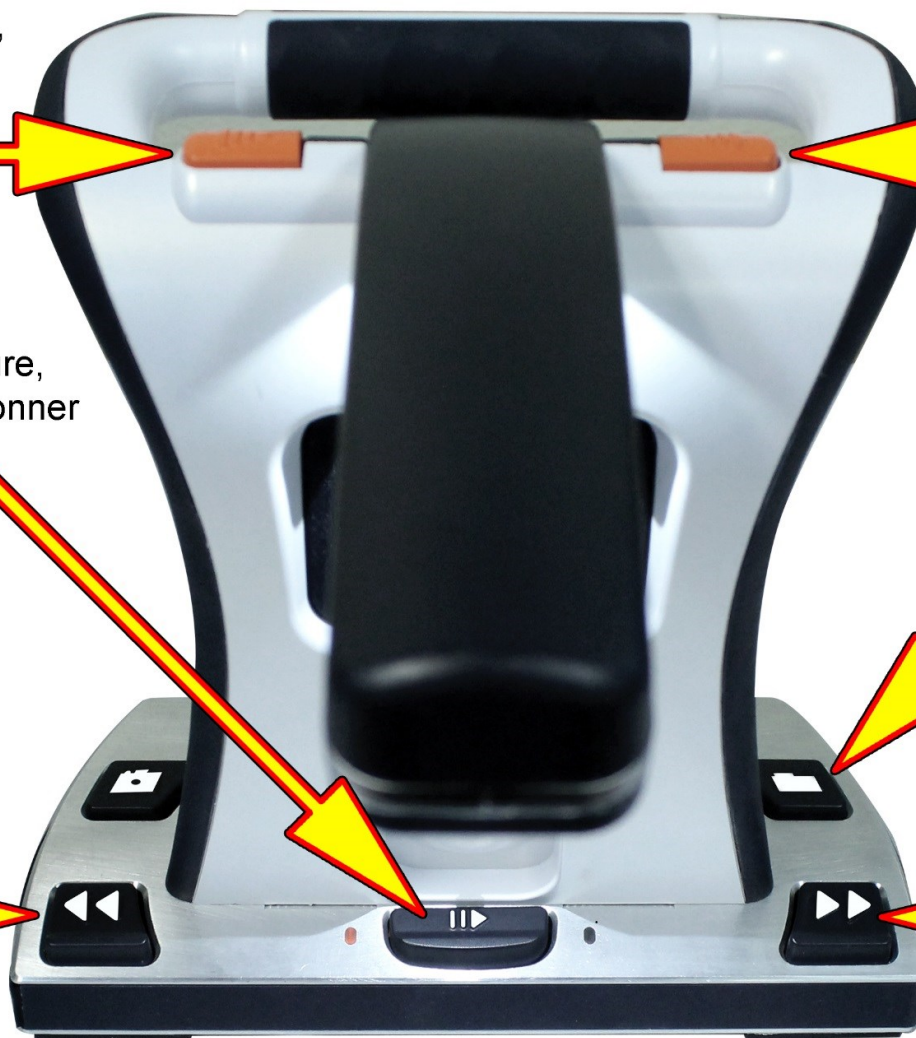

Guide de démarrage rapide Smart Reader OCR HD

Fonctions appui long

Appuyer et maintenir pour lancer l'OCR en mode tableau

Appuyer et maintenir pour lancer l'OCR en mode tableau

Appuyer et maintenir pour supprimer un élément sauvegardé

Appuyer et maintenir pour ouvrir un document sauvegardé

Appuyer et maintenir pour sauvegarder un document

Appuyer et maintenir pour aller au début du document ou à la page précédente du livre

Appuyer et maintenir pour aller à la fin du document ou à la page suivante du livre

Guide de démarrage rapide Smart Reader OCR HD

Fonctions des molettes de tranche

Tourner pour régler le volume
ou faire défiler une image
horizontalement



Tourner pour régler la vitesse
de lecture ou faire défiler
une image verticalement



Guide de démarrage rapide Smart Reader OCR HD

Fonctions raccourcis

Appuyer d'abord Appuyer ensuite



Mot précédent

Appuyer d'abord Puis tourner



Luminosité ou
niveau de zoom

Appuyer d'abord Appuyer ensuite



Menu ou
paramètres usine
(appui long)

Appuyer d'abord Appuyer ensuite



Mot suivant

Appuyer d'abord Puis tourner



Mode de couleur

Appuyer d'abord Appuyer ensuite



Lumière
(marche/arrêt)